



i-view™ vidéo-laryngoscope

La vidéo-laryngoscopie quel que soit le lieu ou le moment pour intuber



Gestion des Voies Aériennes ▪ Accessoires pour Voies Aériennes

Présentation du vidéo-laryngoscope i-view™

Taille unique ▪ Usage unique ▪ Entièrement jetable

i-view est un nouveau vidéo-laryngoscope à usage unique, entièrement jetable, pour offrir une solution supplémentaire quelle que soit la situation où une intubation doit être réalisée.

Grâce à sa lame Macintosh, l'i-view peut également convenir en laryngoscopie directe car la technique d'insertion est plus familière et instinctive qu'avec des dispositifs à lame hyper courbée. Prêt à l'emploi seulement quelques secondes après sa sortie de l'emballage, la conception ergonomique de l'i-view rend son utilisation facile, et son écran LCD intégré procure une visualisation optimale dans différentes conditions de luminosité ambiante.



i-view offre l'opportunité de la vidéo-laryngoscopie 'quel que soit le lieu ou le moment pour intuber'

Là où la disponibilité d'un vidéo-laryngoscope pourrait être limitée en raison des coûts liés à l'achat de dispositifs réutilisables pour de multiples sites, l'i-view offre une solution économique, en combinant tous les avantages d'un vidéo-laryngoscope monobloc dans un dispositif jetable à usage unique. L'i-view est idéal pour une utilisation en :

- pré-hospitalier
- médecine d'urgence
- réanimation
- anesthésie
- voies aériennes difficiles
- soins intensifs



En soins intensifs



En pré-hospitalier / réanimation



En voies aériennes difficiles



Caractéristiques et avantages

La vidéo-laryngoscopie quel que soit le lieu ou le moment pour intuber

Taille unique

nul besoin de stocker différentes tailles

Usage unique

prévient le risque de contamination croisée et évite les coûts de retraitement

Entièrement jetable

nul besoin de retirer les batteries avant la mise aux déchets

Ecran LCD intégré

procurant une visualisation optimale dans différentes conditions de luminosité ambiante

Conception ergonomique

assurant une utilisation confortable et instinctive de l'i-view



Bouton Marche/Arrêt

l'i-view est prêt à l'emploi quelques secondes après la sortie de l'emballage

Caméra et lumière LED

visualisation optimale



Lame Macintosh

l'i-view permet aussi bien la visualisation directe que la vidéo-laryngoscopie



▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr





i-view est livré en boîte de 8 unités. Chaque dispositif est emballé individuellement dans une coque rigide et hermétique, recouverte d'un film plastique, spécialement conçue pour assurer la protection du dispositif, aussi bien pendant le transport que le stockage. L'emballage est pourvu d'une ouverture facile grâce à une languette marquée d'un symbole, permettant de tirer le film plastique et pouvoir libérer le dispositif. Le numéro de LOT et la date de péremption du dispositif sont situés sur la tranche supérieure au-dessus de l'écran LCD.



Référence	Description	Qté/bte
8008000	i-view vidéo-laryngoscope	8

Faire une demande



www.intersurgical.fr/info/iview

IS6.15 FR ▪ Issue 2 07.19



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia