




Air-Guard Clear

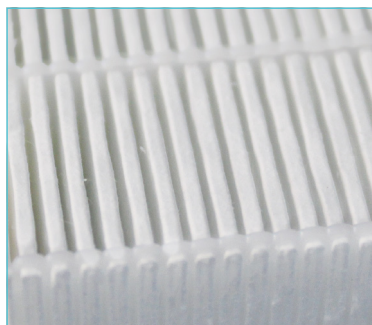

Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtrés Respiratoires

Air-Guard™

Pour une utilisation sur respirateurs ou concentrateurs d'oxygène

Intersurgical vous présente le filtre Air-Guard Clear, un filtre hydrophobe à membrane plissée conçu pour la protection des respirateurs d'anesthésie, de soins intensifs, de transport, ou des concentrateurs d'oxygène.


Le filtre Air-Guard Clear agit comme une barrière antimicrobienne lorsqu'utilisé sur des respirateurs ou concentrateurs d'oxygène pour les protéger d'une éventuelle contamination. Il est validé contre les attaques bactériennes et virales, sur une durée de 24 heures, suivant la procédure décrite dans le protocole BS EN 13328-1 (Bactérien/viral).

A la discrétion du clinicien, le filtre Air-Guard Clear peut être utilisé pour une durée prolongée en protection des concentrateurs d'oxygène. De nombreux filtres bactériens/viraux sont contre-indiqués pour des durées d'utilisation supérieures à 24 heures car ils ne sont pas validés pour une utilisation prolongée.


Ce dispositif excelle en matière de filtration bactérienne et virale et peut être utilisé comme tel au sein d'un circuit respiratoire, en respectant la durée maximale d'utilisation de 24 heures, correspondant aux procédures correctes habituelles relatives aux filtres respiratoires.

Précaution : ce produit est contre-indiqué pour une utilisation à la connexion patient du circuit respiratoire.

Protection des respirateurs

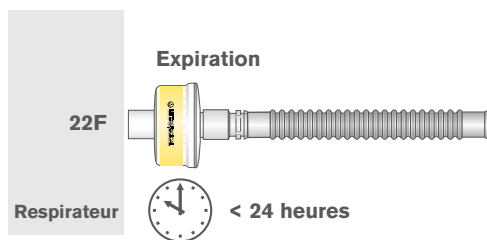

Protection des concentrateurs d'oxygène

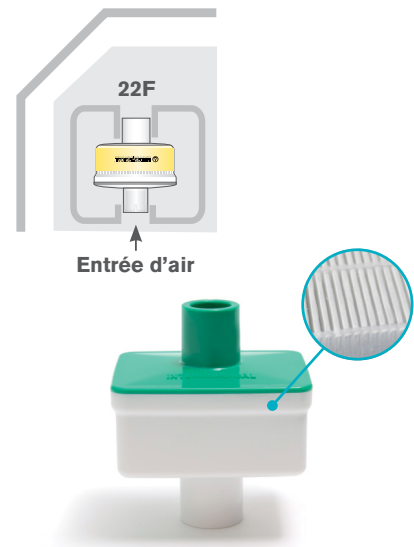

REF	1790000 (S*)	1788000
Qté/bte	50 (40*)	50
Efficacité de filtration	>99.9999%	>99.9999%
Résistance au débit à 30 L/min	0.9 cm H ₂ O	0.7 cm H ₂ O
Résistance au débit à 60 L/min	1.9 cm H ₂ O	1.7 cm H ₂ O
Volume compressible	120 ml	120 ml
Poids	56 g	53 g
Connexions	22F-22M/15F	22F-22M/15F
Volume courant minimum	>360 ml	

(S*) Ajouter un S à la fin du code à sept chiffres pour commander la version stérile ex. 1790000S (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses).

IS12.14 FR • Issue 6 06.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP