



## FilitaNeb™

Kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™, filtre et tuyau



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Nébulisation

Pour répondre à l'évolution des besoins du marché mondial de la santé, cette solution de soins a été développée pour réduire l'émission de particules dans l'environnement pendant la nébulisation. Le kit FiltaNeb™ comprend un masque fermé basé sur le masque Intersurgical EcoLite™ pourvu d'un filtre au niveau de la voie expiratoire. La lèvre du masque est de couleur verte pour différencier ce masque fermé de nos masques aérosols standards. Pour assurer la meilleure étanchéité possible, un élastique supplémentaire est fourni dans le kit.

Ce dispositif offre une réduction >95% des particules dans l'environnement, aidant ainsi à minimiser les émissions de gaz expiratoires potentiellement contaminés s'échappant pendant la nébulisation, réduisant de fait le risque encouru par les professionnels de santé.

Le nébuliseur Cirrus™2 offre de nombreuses caractéristiques, notamment une cuve graduée indiquant précisément la quantité de liquide dans le nébuliseur. La cuve dispose d'un système d'ouverture/fermeture en un quart de tour avec clic de verrouillage, permettant un remplissage rapide de la cuve et une meilleure étanchéité entre la cuve et le corps du nébuliseur.

Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol médicamenteux à visée trachéobronchique. A un débit de gaz moteur de 8 L/min, le Diamètre Massique Médian (MMD) est de 3.1 microns.

#### Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour prévenir toute fuite de médicament nébulisé au niveau des yeux

#### Filtre sur la voie expiratoire

Réduit l'émission de particules dans l'environnement lors de la thérapie

#### Cuve de nébulisation graduée

Préparation plus rapide

#### Faible volume résiduel

Réduit la perte de médicament non nébulisé

#### Élastique supplémentaire

Offrant une étanchéité améliorée entre le masque et le visage du patient

#### Lèvre souple et étanche

Accroît le confort du patient

#### Teinte verte


Pour différencier ce masque fermé de nos masques aérosols standards

#### Double lèvre étanche

Assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage

#### Ouverture facile et rapide

Un quart de tour, avec clic de verrouillage

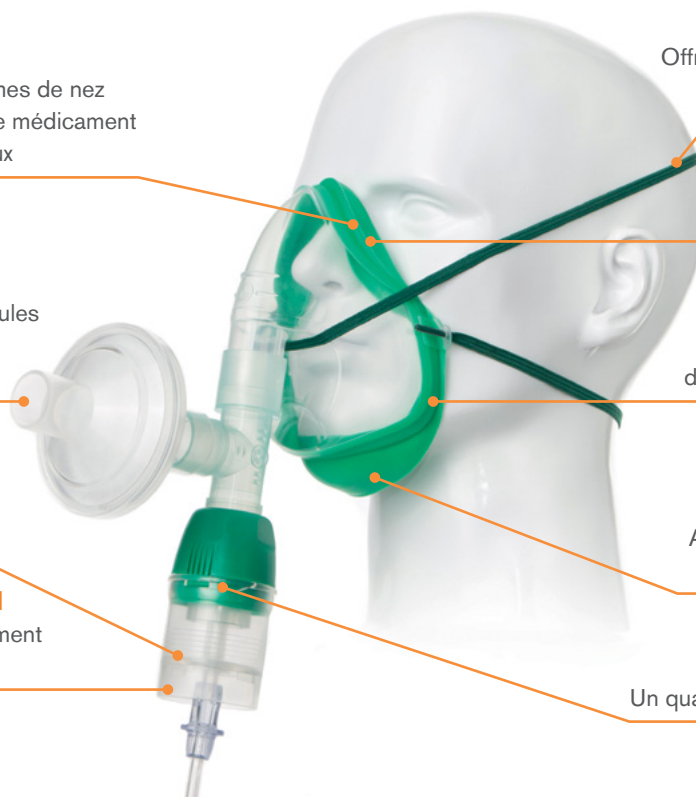

Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1453044	FiltaNeb™, kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™, filtre et tuyau	2.1 m	12

Produit à faible impact environnemental



33, Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny, Le Périgole, 94127 Fontenay-Sous-Bois Cedex  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

#### Pensez-y avant d'imprimer

Économisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS10.39 FR • Issue 3 08.21